

巧克力琼脂培养基（不加抗生素）说明书

【产品名称】

巧克力琼脂培养基（不加抗生素）

【包装规格】

Φ70mm、Φ90mm、Φ70mm-ET、Φ90mm-ET，各有1人份/包、5人份/包、10人份/包、20人份/盒。

【预期用途】

用于嗜血杆菌、奈瑟菌等苛养菌的培养。

【主要组成成分】

主要由塑料平皿和培养基基质组成。培养基基质主要由蛋白胨、牛肉膏、氯化钠、琼脂、无菌羊血组成。

【储存条件及有效期】

2-8℃密封保存，有效期90天；2-30℃运输5天以内，产品保持稳定。

【检验方法】

1. 复温：冰箱内取出巧克力琼脂培养基（不含抗生素），并使其温度在接种前接近室温。
2. 标本采集：常规采集标本。
3. 接种：采集的标本应立即划线接种或用棉签将标本涂布整个平板；如不能及时送检，应将标本置于适宜的储存环境待送，但存放一般不能超过24h。
4. 培养：将接种好的培养基置于36℃±1℃的培养箱中培养18-24h，观察菌落生长情况。

【检验结果的解释】

在规定的培养时间观察培养基上的菌落特征，并可以挑取可疑菌落进行染色、生化鉴定和药敏分析等。

【注意事项】

- 1、本品仅作为细菌的体外培养，供一次性使用。
- 2、使用前如发现培养基有干涸、杂菌污染迹象均不能再使用。
- 3、使用前应仔细阅读说明书，在有效期内使用。
- 4、用后应按医院或环保部门要求处置废弃物。

【参考文献】

- 1、国家食品药品监督管理局《体外诊断试剂说明书编写指导原则》2007.4.28
- 2、叶应妩.王毓三主编《全国临床检验操作规程》.卫生部医政司.

【基本信息】

备案人/生产企业名称：济南百博生物技术股份有限公司

住 所：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地5号楼303厂房
联系方式：

邮 编：250101

电 话：400-6760-599

传 真：0531-86420030

网 址：www.jnbaibo.com

售后服务单位名称：济南百博生物技术股份有限公司

联系方式：400-6760-599

生产地址：济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地5号楼303，305

生产备案凭证编号：鲁济食药监械生产备20140056号

【医疗器械备案凭证编号/产品技术要求编号】鲁济械备20140278号

【说明书核准及修改日期】核准日期：2014年11月10日 修改日期：2019年8月12日